

## Vorgehen beim Probenversand von Kotproben für parasitologische Untersuchungen

### 1. Probennahme

a) **Pferd:** ca. 1-3 Äpfel;

**Schaf/Ziege/Kameliden:** eine gute Handvoll Kötterl;

Im Urinbecher mit Schraubdeckel oder in einem handelsüblichen Zipperbeutel/Gefrierbeutel

**Hund/Katze:** Tischtennisball-große Menge;

im Kotröhrchen mit Schraubdeckel (mindestens 1/3 gefüllt) oder einem anderen Plastikgefäß

**Heimtier/Vogel/Reptil:** min. erbsengroß, soviel wie möglich in Röhrchen

**Durchfallkot** bitte unbedingt in Gefäß mit dichtem Schraubdeckel versenden!



b) Probengefäß mit Tiernamen beschriften

c) Alles gut verschließen und gemäß den Beförderungsbestimmungen der Post versenden.

**Das heißt, die Probe muss doppelt verpackt sein (Verpackung und Umverpackung mit saugfähigem Polstermaterial (z.B. Küchenrolle)) aus stabilem auslaufsicherem geruchsdichtem Plastikmaterial. Der Versand muss in stabilem Karton (Päckchen, Paket) oder reißfestem Luftpolsterumschlag erfolgen.**

**Falsch oder ungenügend verpackte Proben werden von der Post nicht befördert!**



Primär-, Sekundärgefäß  
+ Saugschutz

### 2. Untersuchungsantrag ausfüllen und gewünschte Untersuchung(en) ankreuzen.



Veterinär-biologische Spezialdiagnostik

Untersuchungsantrag Pferd - Equiden

Labor ParaDocs, Wittumweg 32, 88260 Argenbühl-Eisenharz  
www.laborparadocs.de E-Mail: info@laborparadocs.de

Tierhalter:in/Stallbetreiber:in	Praxis (Angabe optional)
Name:	
Straße/Hausnummer:	
PLZ/Ort:	
Telefon:	
E-Mail:	E-Mail:

### 3. Probe und Untersuchungsantrag in (Maxi-)Brief, Päckchen oder Paket verpacken.



4. **Versand an:** Labor ParaDocs  
Wittumweg 32  
88260 Argenbühl-Eisenharz

\* Geeignetes Probenversandmaterial kann auch vorab bei uns im Labor zum Preis von 8 € zzgl. MwSt. angefordert werden. Probenröhrchen gibt es aber auch in der lokalen Apotheke.