


## Vorgehen beim Probenversand von Kotproben für parasitologische Untersuchungen

### 1. Probennahme

**a) Pferd:** ca. 1-2 Äpfel; **Hund/Katze:** Tischtennisball-große Menge; **Schaf/Ziege/Kameliden:** eine Handvoll Kötter; **Heimtier/Vogel/Reptil:** min. Erbsengroß, soviel wie möglich  
Entweder im Einmalhandschuh, den man auf links dreht/umdreht  
oder im Hundkotbeutel

oder in handelsüblichen Zipperbeutel/Gefrierbeutel  
oder im Kotröhrchen (mindestens 1/3 gefüllt)

**Durchfallkot** bitte unbedingt in Gefäß mit dichtem Schraubdeckel versenden!

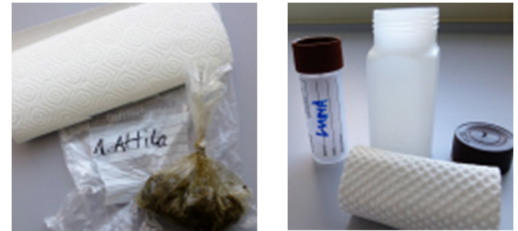

**b) Probengefäß mit Tiernamen beschriften**

**c) Alles gut und auslaufsicher verschließen und gemäß den Beförderungsbestimmungen der Post in ebenfalls gut verschlossene, stabile Umverpackung mit saugfähigem Polstermaterial (z.B. Küchenrolle) geben.\***



### 2. Untersuchungsantrag ausfüllen und gewünschte Untersuchung(en) ankreuzen.

LABOR ParaDocs		Untersuchungsantrag Tierbesitzer	
<p>Name: _____</p> <p>Anschrift: _____</p> <p>Telefon: _____</p> <p>E-Mail: _____</p> <p>Bestimmte Untersuchung: _____</p>		<p>Behandelter Tierart: _____</p> <p>Bestand per 3. März 2014:</p> <p>Bestand an: <input type="checkbox"/> Tierarzt <input type="checkbox"/> Einzelstall</p> <p>Bestand an: <input type="checkbox"/> Farnen <input type="checkbox"/> Einzelstall</p>	

### 3. Probe und Untersuchungsantrag in (Maxi-)Brief, Päckchen oder Paket verpacken.



**4. Versand an:** Labor ParaDocs  
Münchener Str. 101  
Gebäude 4  
85737 Ismaning



\* Geeignetes Probenversandmaterial kann auch vorab bei uns im Labor zum Preis von 5,50 € zzgl. MwSt. angefordert werden. Probenröhrchen gibt es aber auch in der lokalen Apotheke.

**Labor ParaDocs**

Münchener Str. 101, Geb. 04, 85737 Ismaning

Tel. 089/920084-50 | Fax. 089/920084-55 | info@laborparadocs.de | www.laborparadocs.de